


## Monteringsanvisning Vägghängd Svan Lift art nr 10702

Denna monteringsanvisning är ett komplement till "Svan Lift Bruksanvisning (art nr 10780)"

Montering av Vägghängd Svan Lift får endast utföras av person med erfarenhet av denna typen av arbete.

Krav för att montera lyften i väggen är att vart fäste skall tåla en dragande kraft på minst 50 kg. Typ av vägg som går bra är betongvägg med plugg, trävägg eller liknande.

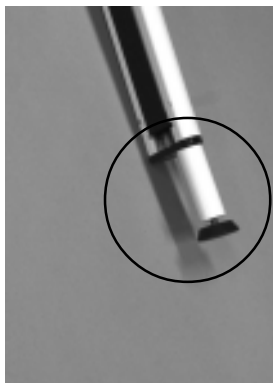

1. Montera de båda fötterna på benen samt de båda armstöden på sittplåten.



2. Placera lyften över toalettstolen. Anslut handkontrollen under huven. Slå på strömbrytaren under huven



3. Häkta på sittplåten i sitt översta läge och sänk sedan sitsen så att plåten vilar på toalettstolen



4. Centrera lyften så att de båda hålen i bakkant av sittplåten hamnar rakt över toalettens båda hål.



5. Justera in de övre väggfästena så 950mm från golvet, markera borra, plugga och skruva.

7. Montera fast den medföljande sitsen på sittplåten.



6. Montera de båda undre fästena. Se till att alla monterings-skrivar är åtdragna.