




GRIPO ALU

Stödstång

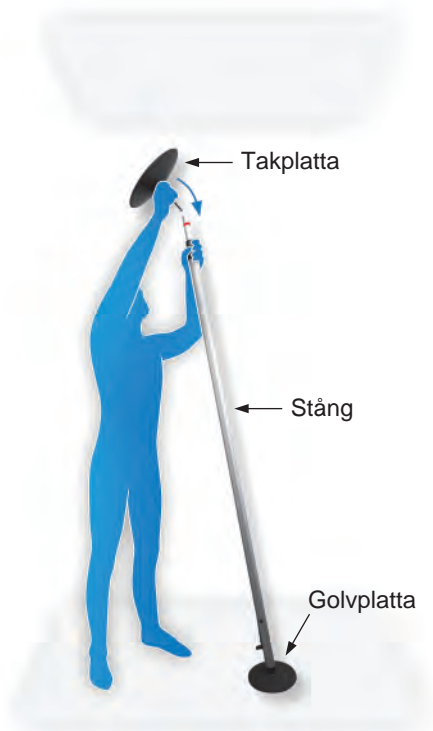


-
- 1** Montera stången på golvplattan och skjut in takplattan i stången.



-
- 2** Placera stången på utvald plats.
- 3** Dra ut fotpedalen.
- 4** Öppna snabbkopplingen.



- 5** Vrid det övre röret åt vänster (som figuren visar) tills motståndet blir tillräckligt stort. Det övre röret ska inte falla ned i det nedre, utan ska hållas kvar av friktionen.

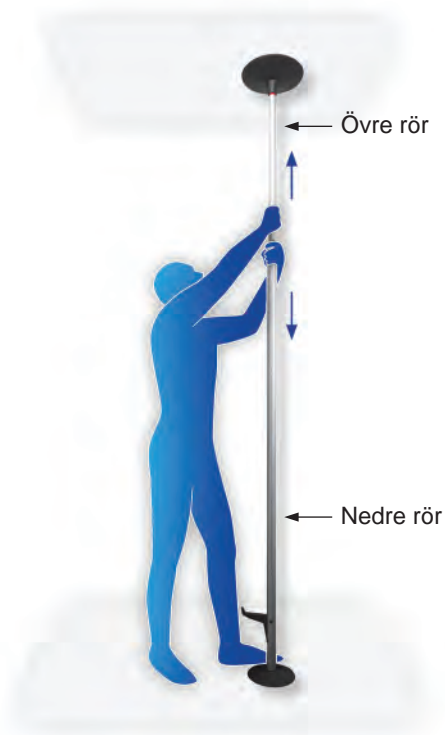

- 6** Förläng stängen tills takplattan når taket genom att dra ut det övre röret. Tryck samtidigt ned det nedre röret mot golvet.

När takplattan når taket, vrid det övre röret ytterligare åt vänster tills friktionen låser fast rören.



7 Lås snabbkopplingen.

8 Tryck ned fotpedalen.

9 Kontrollera att den röda markeringen är borta. Om inte, starta om från punkt 2.

Demontering: Öppna snabbkopplingen (fig. 4) och dra upp fotpedalen (fig. 3). Vid behov, vrid det inre röret åt höger.

 **SVANCARE**[®]

Tillverkas i Norge av: 
HEPRO
 -easy life

Svan Care AB, Alvägen 1, 771 41 Ludvika, Sweden • Tel + 46 (0) 240 101 02 • Fax + 46 (0) 240 100 22

www.svancare.se • info@svancare.se