

2010-02-15

Bruksanvisning Benförlängare till Svan Balance artnr: 10087

denna bruksanvisnings art nr: 10193



Användningsområde:

Svan Balance har en ställbar fot som går att justera mellan 0 – 65 mm beroende på toalettporslinets höjd. Om toalettporslinet har en högre höjd än 460mm skall benförlängare användas. Benförlängaren kan monteras på 2 olika sätt beroende på toalettporslinets höjd.

- Benförlängare med den medföljande ställfoten (55 mm) 75 – 100 mm
Ordinarie ställfot(85) används inte.
- Benförlängare med ordinarie ställfot (85 mm) 100 – 130 mm
Den medföljande ställfoten(55) används inte.

Ingår i satsen (art nr 10087)

- 2st Hylsa med fäste
- 2 st Ställfot 55mm

Montering

1. Skruva ur den befintliga ställfoten (85 mm)
2. Skruva i Hylsan.
3. Skruva nu i ställfoten 55mm eller 85 mm.

Tänk på att det är alltid att föredra att ha så kort utskruvade ställfötter som möjligt, detta för att produkten då blir stabilare. Om toalettporslinet är av förhöjd modell så kanske det kan vara att föredra att byta till ett standardporslin.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

Svan Care, Alvägen 1, 771 92 Ludvika tel: 0240 – 10102 fax 0240 – 10022
info@svancare.se , www.svancare.se