


GRIPO ALU

Kombigrepp

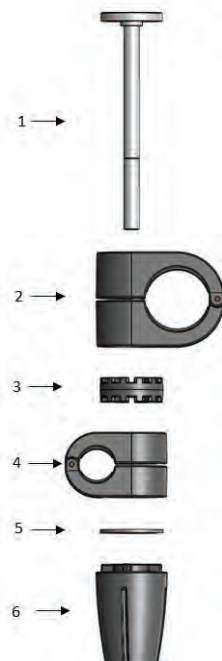

A

Packa upp mottagna delar och kontrollera att ingenting fattas.


Produkten ska bestå av:
- Två universalkopplingar
- Ett kombigrepp

B


Universalkopplingen skruvas isär i sex delar.

Artikelnr:
35208

Benämning:
Kombigrepp kompl. med 2 st universalkopplingar

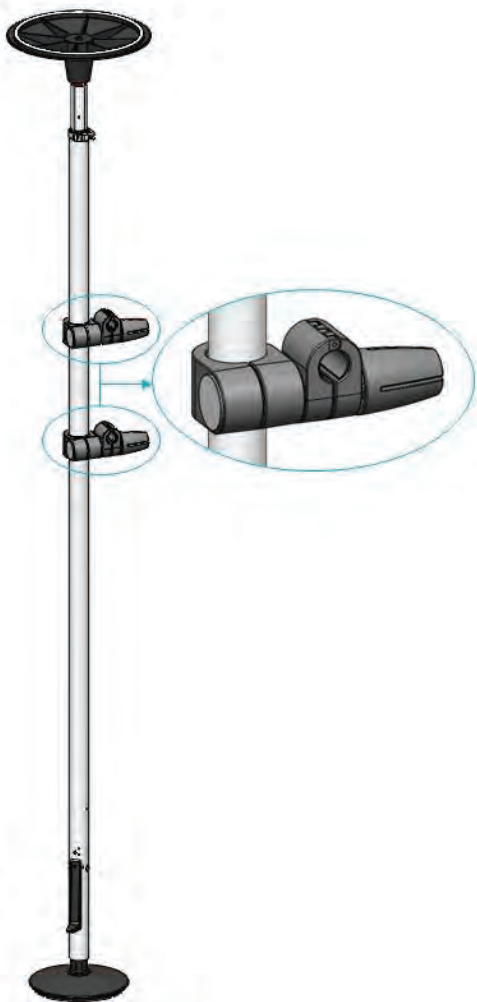

- C** Fäst den största klämman (2) runt Gripo-stängens. Montera därefter ihop universalkopplingen i motsatt ordning som i punkt B. Den minsta klämman (4) sätts 90° i förhållande till den andra (2).

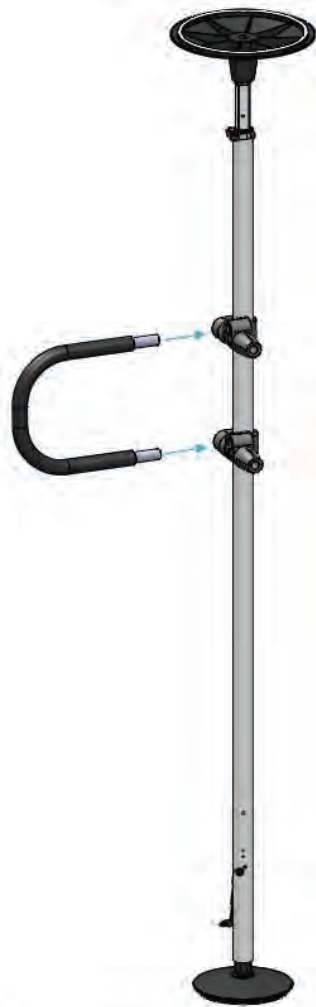

- D** Skjut därefter kombigreppet på universalkopplingarna. Ställ in tillbehöret i önskad höjd och spänn åt ordentligt.



Kontrollera att universal-
kopplingarna är tillräckligt
åtdragna, så att stången
inte vrider sig eller lossnar
vid användning.



E

Kontrollera att produkten
fungerar som avsett.

F

Börja använda produkten.

 **SVANCARE**[®]

Tillverkas i Norge av:


HEPRO
-easy life

Svan Care AB, Alvägen 1, 771 41 Ludvika, Sweden • Tel + 46 (0) 240 101 02 • Fax + 46 (0) 240 100 22

www.svancare.se • info@svancare.se