



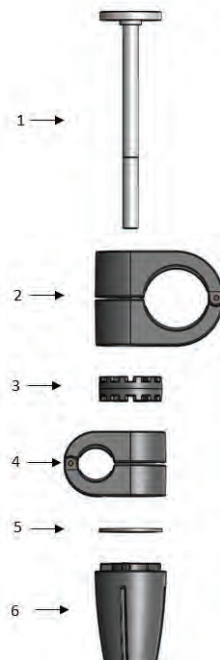

**GRIPO ALU**

**Triangelhandtag**

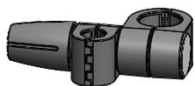

A

Packa upp mottagna delar och kontrollera att ingenting fattas.

Produkten ska bestå av:

- En universalkoppling
- Triangelhandtag

B

Universalkopplingen skruvas isär i sex delar.

Artikelnr:  
35145

Benämning:  
Triangelhandtag kompl. med universalkoppling



- C** Fäst den största klämman (2) runt Gripo-stången. Fastställ önskad vinkel på triangelhandtaget genom att vrida den minsta klämman (4) i förhållande till ingreppsskivan (3). Montera därefter ihop universalkopplingen i motsatt ordning som i punkt B.



- D** Skjut därefter triangelhandtaget på plats i den minsta klämman i universalkopplingen. Sätt handtaget i önskad höjd och spänn åt universalkopplingen ordentligt.



Kontrollera att universal-  
kopplingen är tillräckligt  
åtdragen, så att triangel-  
handtaget inte vrider  
sig eller lossnar vid  
användning.



---

**E**

Kontrollera att produkten  
fungerar som avsett.

---

**F**

Börja använda produkten.

---

 **SVANCARE**<sup>®</sup>

Tillverkas i Norge av:

  
**HEPRO**  
-easy life

Svan Care AB, Alvägen 1, 771 41 Ludvika, Sweden • Tel + 46 (0) 240 101 02 • Fax + 46 (0) 240 100 22

[www.svancare.se](http://www.svancare.se) • [info@svancare.se](mailto:info@svancare.se)