

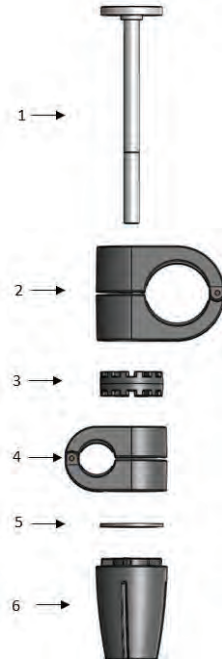


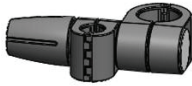

**GRIPO ALU** Vertikalt minigrepp

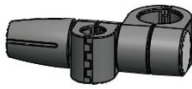

**A**

Packa upp mottagna delar och kontrollera att ingenting fattas.


Produkten ska bestå av:  
- Två universalkopplingar  
- En stång

**B**

Universalkopplingen skruvas isär i sex delar.


Artikelnr:  
35158

Benämning:  
Vertikalt minigrepp 22 mm diam. Komplet med universalkopplingar.

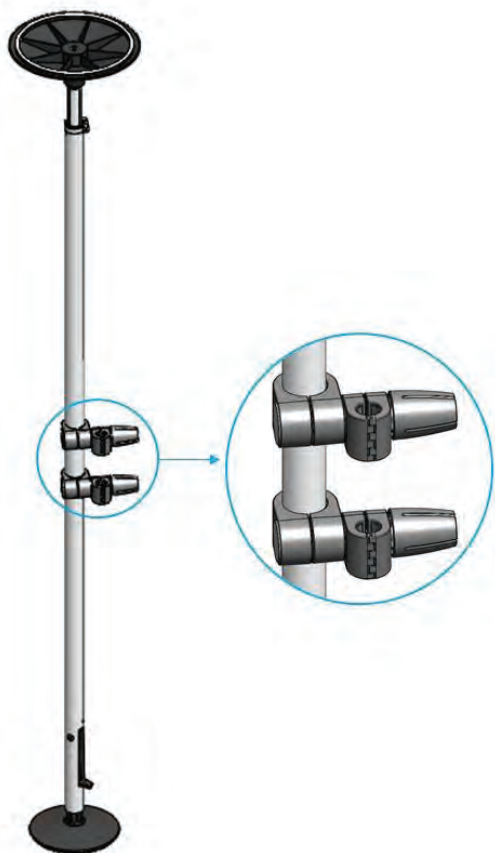

C

Fäst de största klämmorna (2) runt Gripo-stången. Montera därefter universalkopplingarna på Gripo-stången i motsatt ordning som i punkt B.

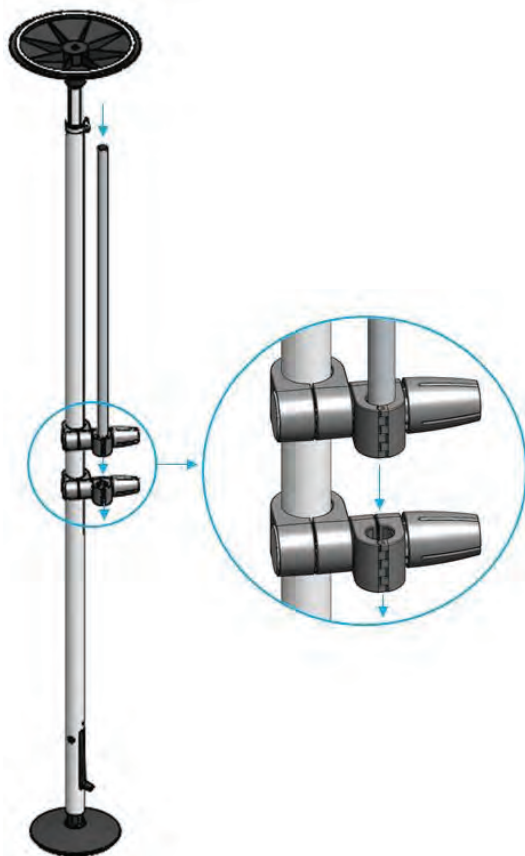

D

Skjut den medföljande stången genom de två mindre klämmorna (4). Justera avståndet mellan universalkopplingarna efter behag och dra sedan åt så att stången sitter ordentligt fast.



Kontrollera att universal-  
kopplingarna är tillräckligt  
åtdragna, så att stången  
inte vrider sig eller lossnar  
vid användning.



E

Kontrollera att produkten  
fungerar som avsett.

F

Börja använda produkten.

 **SVANCARE**<sup>®</sup>

Tillverkas i Norge av:

  
**HEPRO**  
-easy life

Svan Care AB, Alvägen 1, 771 41 Ludvika, Sweden • Tel + 46 (0) 240 101 02 • Fax + 46 (0) 240 100 22

[www.svancare.se](http://www.svancare.se) • [info@svancare.se](mailto:info@svancare.se)