


2010-02-15

Bruksanvisning Hålförminskare Artnr:10050, 10047, 10046, 10049

denna bruksanvisnings art nr: 10090

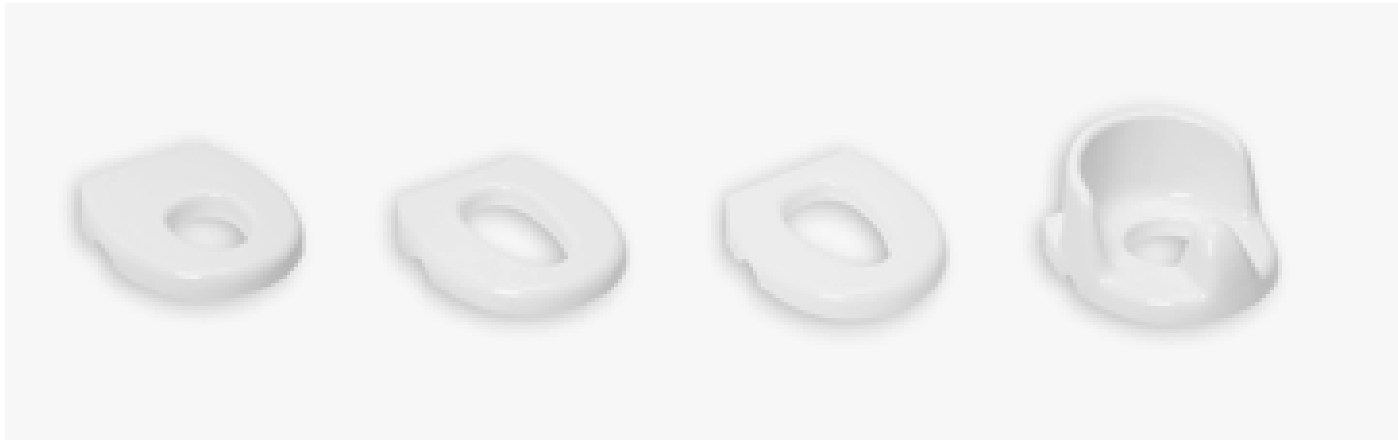

Användningsoråde

Dessa hålförminskare är anpassade att användas tillsammans med Kan sitsen (art nr 10041). Hålförminskarna placeras ovanpå Kansitsen. Hålförminskarna skall vara snabba att lägga på och ta av från toaletten, därför skall de ej sättas fast med remmar, tejp, kardborreband eller dylikt.

Vissa hålförminskare är försedda med ett skyddande plastskikt, avlägsna detta innan produkten tas i bruk.

Var aktsam om produkten då den ej ligger på toaletten. Förvara produkten så den ej skadas, krok på väggen eller placering på hylla. Om den lutas mot vägg finns risk att den glider ner och sedan trampas på.

Kontrollera produkten regelbundet så att den ej har blivit skadad. Skadad produkt får ej användas.

Teknisk information

Max vikt: 40 kg

Material: ABS plast med styrenskikt

Rengöring: Tvål och vatten, alkaliska rengöringsmedel, tvättspnit



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

Svan Care, Alvägen 1, 771 92 Ludvika tel: 0240 – 10102 fax 0240 – 10022
info@svancare.se , www.svancare.se