

2010-02-15

## **Bruksanvisning Mjuksits artnr: 10399**

denna bruksanvisnings art nr: 10845



### **Användning.**

Mjuksitsen gör att sittytan på en toalettsits blir mjukare och varmare att sitta på. Mjuksitsen är framförallt anpassad att användas tillsammans med Kan sitsen (art nr 10041) och Bidette. Kan sitsen finns på våra produkter Balance och Lift. Det finns många andra toalettsitsar på marknaden som mjuksitsen passar på.

### **Applicering.**

Mjuksitsen trycks fast, kränges på toalettsitsen. Vid borttagande kränges mjuksitsen försiktigt av så att inte mjuksitsen skadas. Var aktsam om produkten då den ej används på toaletten. Förvara produkten så att ej andra föremål ligger direkt på produkten och gör märken i den. Lämplig förvaringsplats är på en hylla eller större krok på väggen, mjuksitsen kan också sitta permanent på toalettsitsen. Använd aldrig klister eller tejp på mjuksitsen, detta kan skada produkten.

*Plasten som används i mjuksitsen är mycket formbar därför skall ej föremål ligga på sitsen då den ej används. Detta kan ge fula märken på sitsen. Oftast försvinner dessa märken med tiden.*

### **Teknisk information**

Material: Ren cellpolyeten med slutna celler.

Rengöring: Ljummet vatten och mildt rengöringsmedel, tvättsprit.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

Svan Care, Alvägen 1, 771 92 Ludvika tel: 0240 – 10102 fax 0240 – 10022  
info@svancare.se , www.svancare.se