


Montering av Svan Grip armstöd på Nya Bidette-R3-M3-P12

2013-05-17

Montera armstödet enligt bilden. Viktigt att alla delar monteras.

Avsluta monteringen med att dra åt vingmuttrarna hårt.

Max belastning på armstöden är 120 kg tillsammans (60 kg/armstöd)

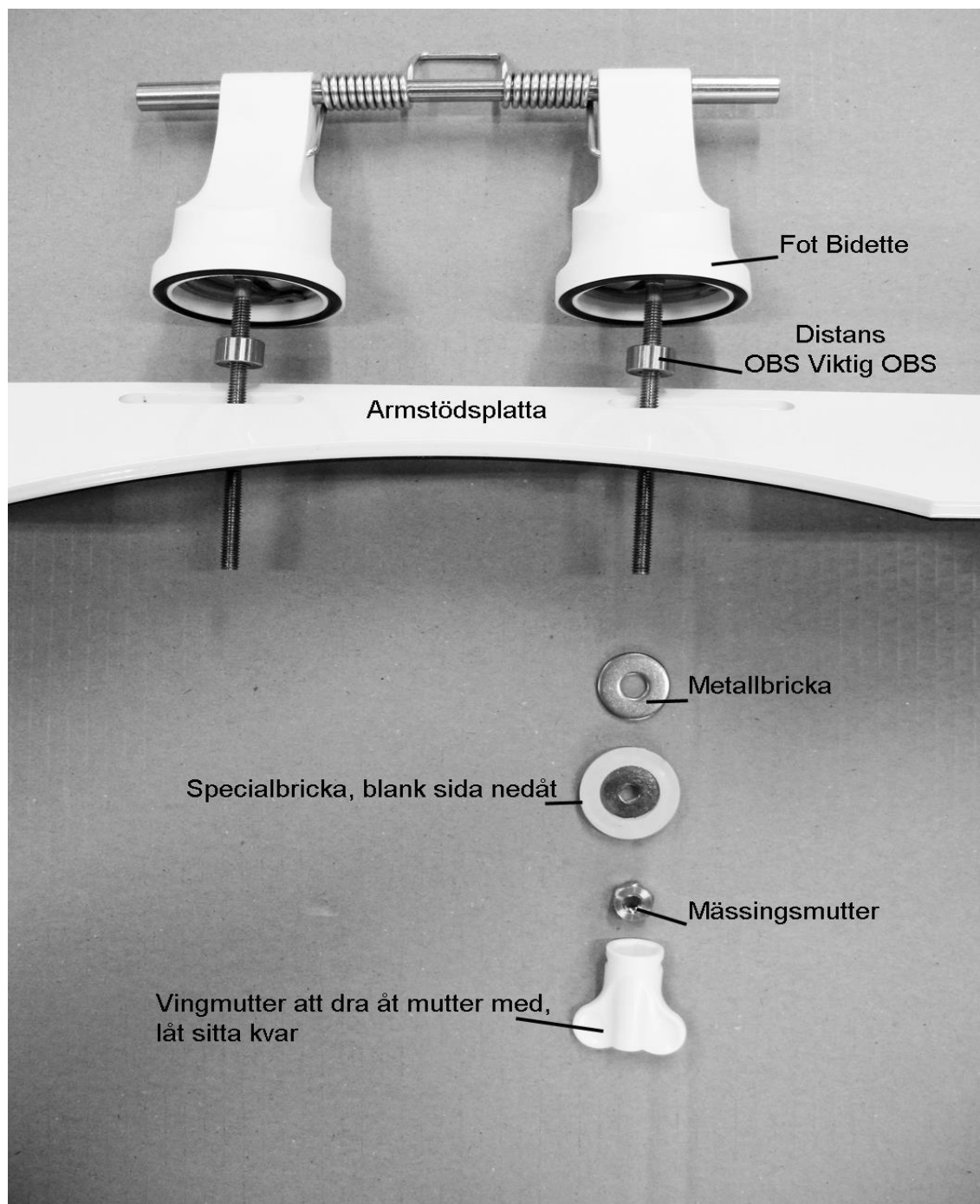

Montering av Svan Grip armstöd på äldre Svan Bidette


2013-08-20

Montera armstödet enligt bilden. Viktigt att alla delar monteras.

OBS Plastkon måste vara försedd med Metallmutter OBS

Avsluta monteringen med att dra åt vingmuttrarna hårt.

Max belastning på armstöden är 120 kg tillsammans (60 kg/armstöd)

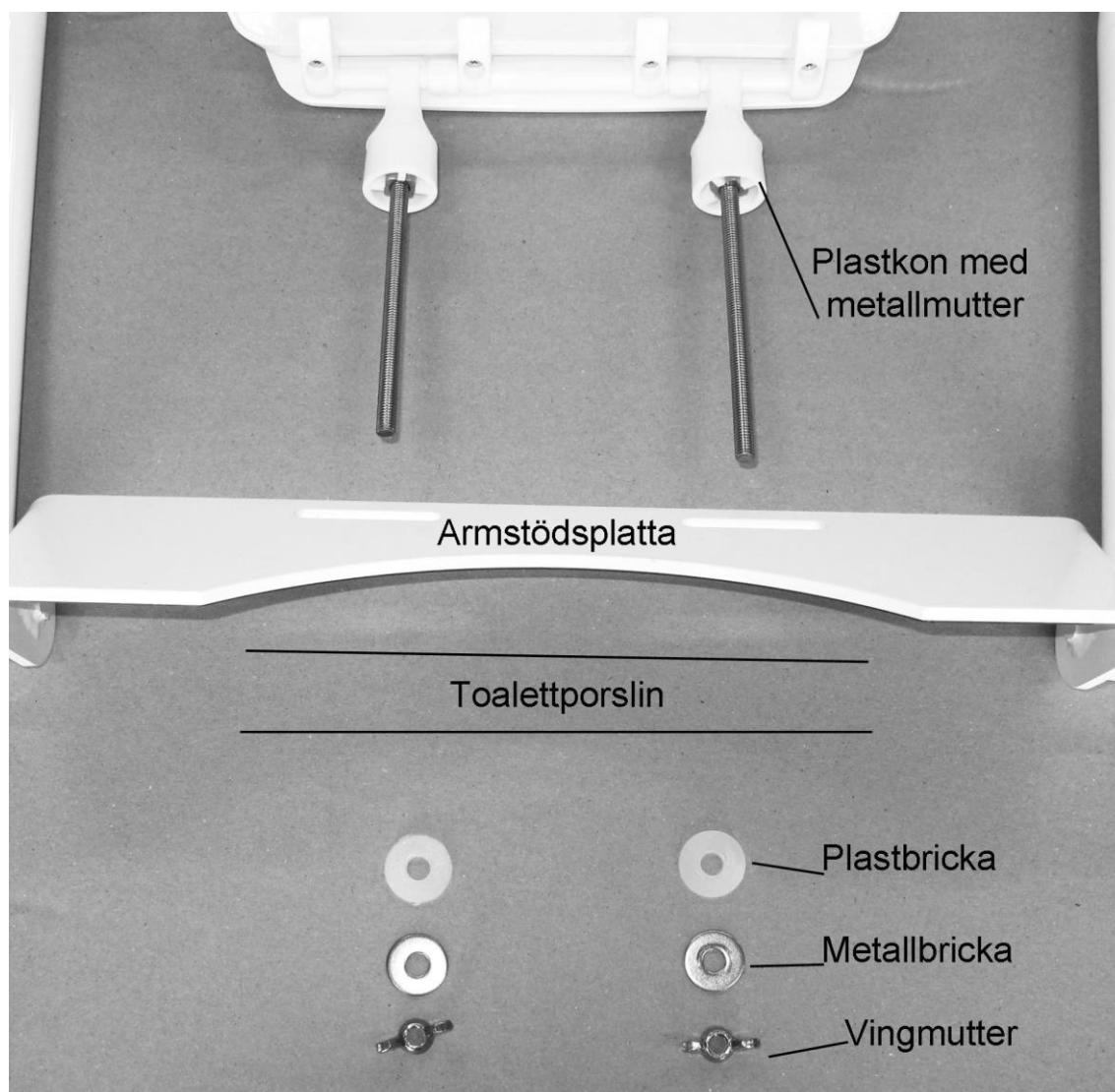

Svan Care AB. www.svancare.se info@svancare.se tel 0240-10102