


## Hur Du Byter Duschmunstycke På Bidette R3,M3 &P12

1. Fäll upp sitsen och dra fram duscharmnen så du kommer åt duschmunstyckets baksida. Där sitter en liten skruv som du skruvar ur med hjälp av en skruvmejsel av typen TX8 (torx).
2. Ta sedan en polygrip eller annan lite starkare tång och vrid om munstycket så att den lossnar eller spricker så du kan ta bort den helt:



3. När munstycket är borttaget så kommer det finnas en massa silikon där munstycket har suttit. Börja med att ta loss sprinten som sitter i hålet. Sedan tar du en liten vass kniv och bara skrapar bort silikonet:

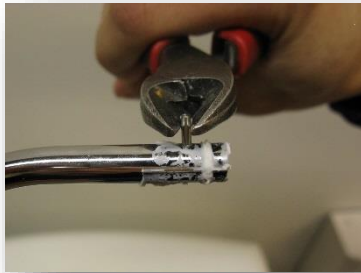

4. När du ska skruva på det nya duschmunstycket så se då till att skruven är tillräckligt urskruvad så det inte blir motstånd när du ska föra på den på duscharmnen.
5. Det sista du gör är att trycka på den så den kommer in hela vägen på duscharmnen och sedan vrider den till det rätta läget så den pekar uppåt och dra sedan åt med en liten insektsnyckel av storleken 1,5mm:

