




# Montering av GRIPO ALU mot tak

**Gripo Alu** är konstruerad för takhöjder mellan 210 och 300 cm. Det finns även varianter för takhöjder lägre än 210 cm, och takhöjder upp till 320 cm.

**Gripo Alu** pressar med en kraft motsvarande 100 kg mot tak och 100 kg mot

golvet. Det är därför viktigt att Gripo-stängens placeras rätt i förhållande till takets konstruktion och reglarnas placering.

Vi rekommenderar att använda **Stor takplatta** (art.nr. 35 153) där man är osäker på takets konstruktion och reglarnas placering.

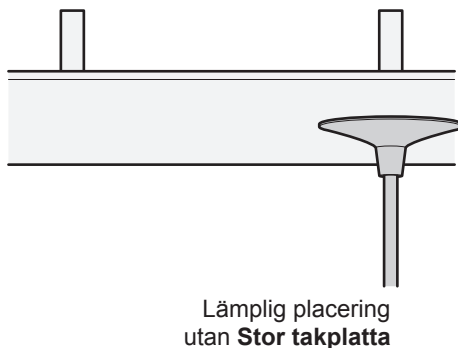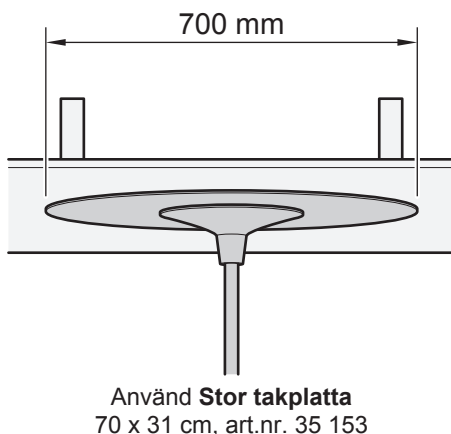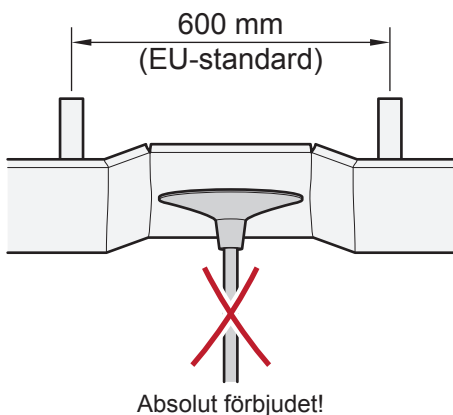

Art. nr. 11 619 Rev A, 160503

 **SVANCARE**<sup>®</sup>

Tillverkas i Norge av:

  
**HEPRO**  
-easy life

Svan Care AB, Alvägen 1, 771 41 Ludvika, Sweden • Tel + 46 (0) 240 101 02 • Fax + 46 (0) 240 100 22

[www.svancare.se](http://www.svancare.se) • [info@svancare.se](mailto:info@svancare.se)