

Bruksanvisning:
Minipall artnr: 10 132



Minipall

Minipall är ett tillbehör till produkten Balance. Minipall kan både användas som en trappa vilket underlättar för små barn att ta sig upp på Balance och som ett högt fotstöd vilket passar för de minsta.

Användning

1. Minipall fästs på den ordinarie fotpallen som bilden visar.
2. Barnet kan först kliva upp på den ordinarie fotpallen för att sedan kliva upp på minipallen.
3. Barnet sätter sig på toaletten och har minipallen som fotstöd.

OBS. Ha alltid uppsikt över barnet och se till att barnet får det stöd han/hon behöver.

Material: Ren cellpolyeten med slutna celler, suger ej åt sig vatten.

Rengörning: Ljummet vatten och mildt rengöringsmedel, tvättsprit.

Översyn: Kontrollera regelbundet att de båda klackarna på baksidan och att stora klacken på framsidan sitter fast.

Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning. denna bruksanvisnings art nr: 10862. 2011-03-25

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika tel: 0240 – 10102 fax 0240 – 10022
info@svancare.se , www.svancare.se

