

Bruksanvisning:

Footpad 5 cm artnr: 11 601

Footpad 10 cm artnr: 11 602



Footpad

Footpad minskar sitthöjden vid sittanden. Vid toalettbesök är detta särskilt viktigt då man måste ha en stabil och bra sittställning. Footpad fungerar vid alla sittanden, stol säng mm.

Användning

1. Användaren sätter sig som vanligt utan footpad.
2. När användaren sitter ner skjuts footpad under fötterna. Footpad är gjort i ett lätt material för att användaren själv ska kunna föra in den under fötterna. Uttaget vändes mot toaletten.
3. Nu kan användaren använda footpad för att trycka sig längre upp på sitsen samt att hitta en bekväm sittställning.

OBS. Footpad får endast användas som ett stöd för ben och fötter. Den är inte avsedd att stå på. Risk finns att man kan halka eller att Footpad glider mot golvet.

Material: Ren cellpolyeten med slutna celler, suger ej åt sig vatten

Rengörning: Ljummet vatten och mildt rengöringsmedel, tvättsprit.

Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning. denna bruksanvisnings art nr: 10861. 2011-03-25

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika tel: 0240 – 10102 fax 0240 – 10022
info@svancare.se, www.svancare.se

