



Bidette R3 kan lätt kombineras med en mobil hygienstol. Den rullas över toalett med monterad Bidette. Inga sladdar eller slangar behöver lossas eller anslutas.

Att tänka på:

- Frihöjden på hygienstolen. Går den över toaletten med Bidette R3 monterad? Bidette bygger 6,5 cm över toaporslinet. Är hygienstolen höj- och sänkbar elektriskt blir anpassningen optimal.
- För att täppa till ev. glipa mellan hygienstol och Bidette-sits kan vår mjuksits användas (art.nr:10398 vit eller 10399 blå).
- För att täcka glipan mellan toaporslin och Bidette använder man vår hygienesits (art.nr: 10631). En glipa kan uppstå eftersom Bidette-sitsen inte blir belastad.
- Eventuella gejdor för bäcken på hygienstolen bör tas bort.

Ändringar av inställningar på Bidette R3's panel (se bruksanvisning Bidette R3):

- Koppla bort eventuell sittvakt-funktion på Bidette R3.
- Öka tiden för torkning och öka värmen på luften.
- Duscharmens läge kan behöva ändras.
- Trycket på vattenstrålen kan behöva ökas.

Övriga möjliga justeringar:

- Armstöd på Bidette kan fällas upp eller monteras bort.
- Toalettlock på Bidette kan monteras bort. Då behövs distanshylsor (art.nr: 11249).
- Gör markering på golvet (med tape eller liknande) när ni hittat optimal placering av hygienstolen.

Se även en film om detta på vår hemsida www.svancare.se/play