




GRIPO ALU

Dävert

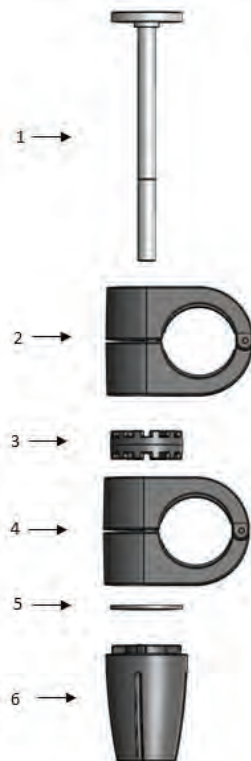

A

Packa upp mottagna delar och kontrollera att ingenting fattas.

Produkten ska bestå av:

- Två universalkopplingar
- En dävert

Artikelnr:

35196

35148

35133

35130

35171

35446

Benämning:

Dävert kompl. med universalkopplingar

Dävert med handtag/gummi med band kompl. med universalkopplingar

Dävert med handtag/gummi med band (utan universalkopplingar)

Universalkoppling 40/22 mm

Handtag till dävert

Dävert med glidstopp

B

Universalkopplingen skruvas isär i sex delar.



C


Fäst klämman (2) runt Gripo-stången. Montera därefter ihop universalkopplingen i motsatt ordning som i punkt B. Träd sedan det vinklade röret på däverten in i den mindre klämman (4). Skjut däverten till önskad höjd och vrid därefter åt universalkopplingen ordentligt.



D

Montera den andra universalkopplingen på Gripo-stången. Den ska monteras i motsatt ordning som i punkt B. Den mindre klämman (4) monteras på plats samtidigt som den fästs på däverten.

Vrid åt universalkopplingen ordentligt.

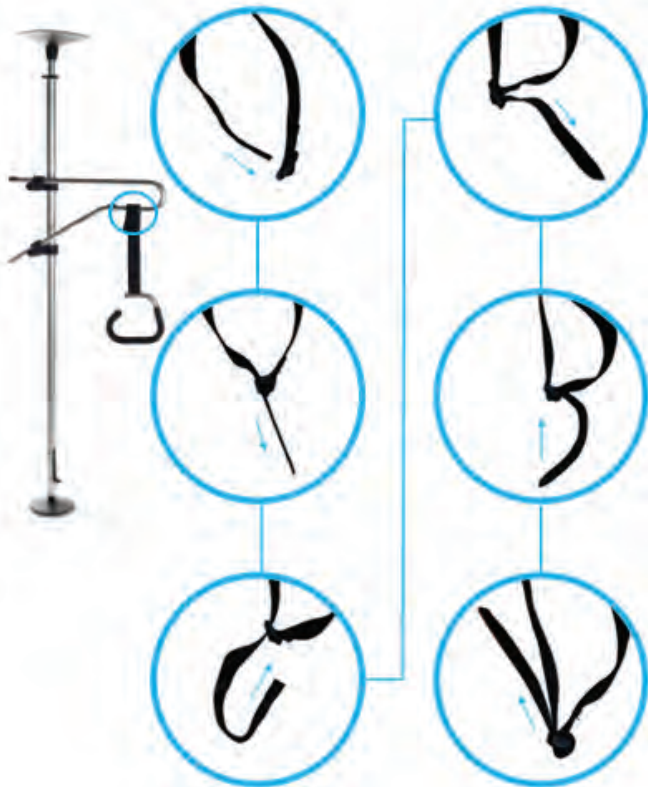

Kontrollera att universal-
kopplingarna är tillräckligt
åtdragna, så att däverten
inte vrider sig eller lossnar
vid användning.



E

Dävert med handtag/gummi med band. Börja med att trä bandet genom däverten och justera till önskad höjd. Bandet skall träs tre gången genom spännet så att det inte lossnar eller glider. Se figur.

F

Börja använda produkten.

 **SVANCARE**[®]

Tillverkas i Norge av:


HEPRO
-easy life

Svan Care AB, Alvägen 1, 771 41 Ludvika, Sweden • Tel + 46 (0) 240 101 02 • Fax + 46 (0) 240 100 22

www.svancare.se • info@svancare.se