



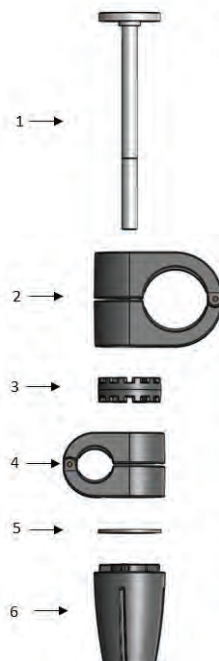

GRIPO ALU Toalettrullehållare

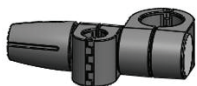

A

Packa upp mottagna delar och kontrollera att ingenting fattas.

Produkten ska bestå av:

- En universalkoppling
- En toalettrullehållare

Artikelnr:

35201

35198

35197

35130

35199

Benämning:

Toalettrullehållare kompl. m. universalkoppling 40/22 mm

Toalettrullehållare kompl. m. universalkoppling 22/22 mm

Toalettrullehållare, lackerad

Universalkoppling 40/22 mm


Universalkoppling 22/22 mm

B

Universalkopplingen skruvas isär i sex delar.



- C** Fäst den största klämman (2) runt Gripo-stängens. Fastställ önskad vinkel på hållaren genom att vrida den minsta klämman (4) i förhållande till taggbrickan (3). Montera därefter ihop universalkopplingen i motsatt ordning som i punkt B.

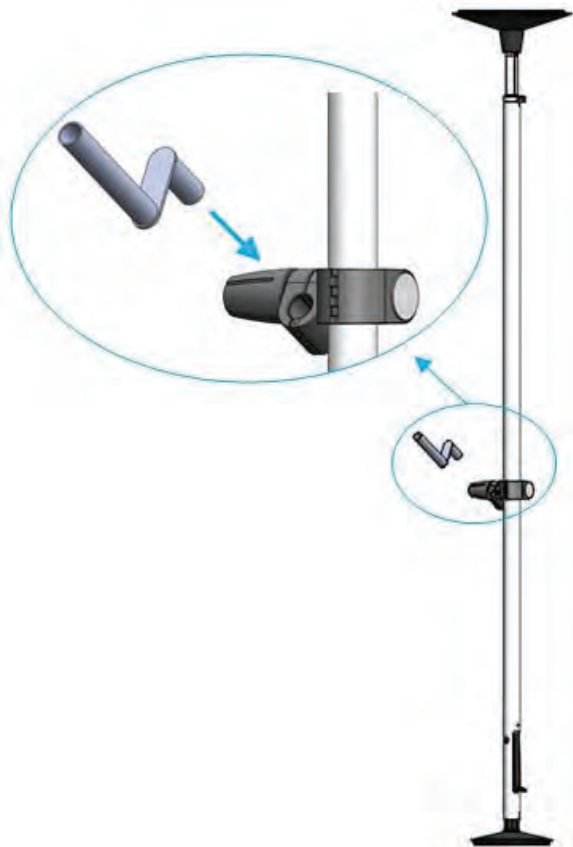

- D** Skjut sedan toaletttrullehållaren på plats i den minsta klämman (4). Dra åt universalkopplingen ordentligt.



E Hållaren kan monteras på flera sätt.

Beställ universalkoppling beroende på placering, då de levereras med olika storlek på klämmorna.

F Börja använda produkten.

 **SVANCARE**[®]

Tillverkas i Norge av:


HEPRO
-easy life

Svan Care AB, Alvägen 1, 771 41 Ludvika, Sweden • Tel + 46 (0) 240 101 02 • Fax + 46 (0) 240 100 22

www.svancare.se • info@svancare.se