


Bidé Elegant

Art. nr. 15 510


Efter installation ska **bruksanvisning** och **installationsanvisning** lämnas kvar hos användaren

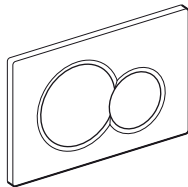

Viktigt!

Vid uppstart (och efter strömavbrott) genomför **Bidé Elegant** automatiskt ett självtest för att kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt.

OBS! VIKTIGT att detta självtest inte avbryts! Självtestet är klart på mindre än 30 sek.

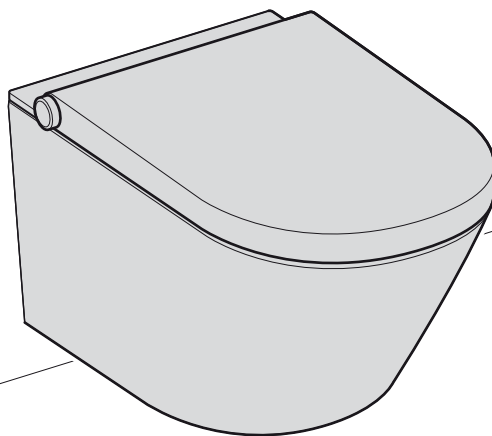


Bidé Elegant (standardutrustad)

Produktbeskrivning


Bidé Elegant är en vägghängd toalett med inbyggd bidé.

SVAN CARE AB
Alvägen 1
771 41 LUDVIKA, Sweden

Tel: 0240-101 02, fax: 0240-100 22
info@svancare.se
www.svancare.se

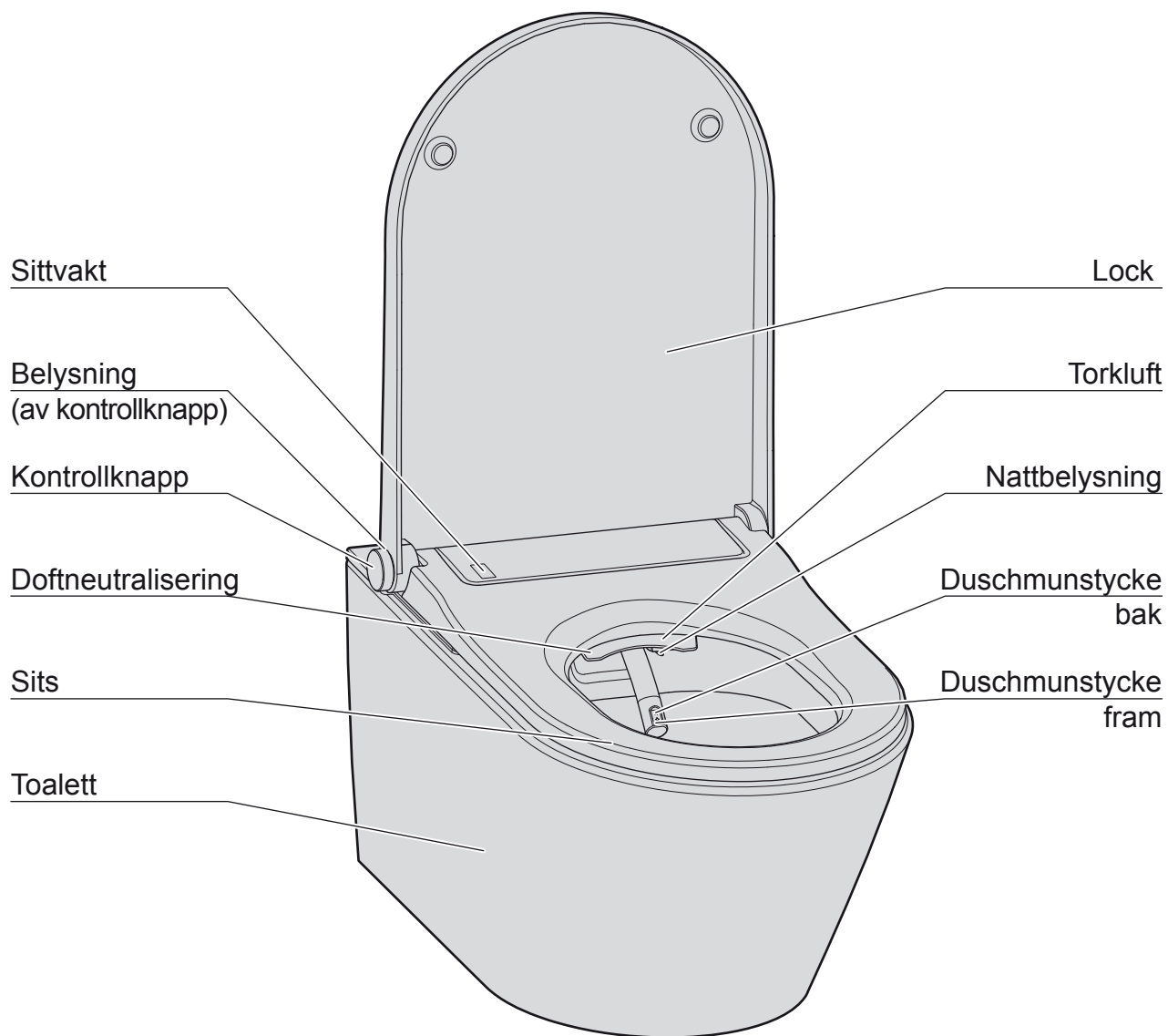


Handkontroll (trådlös) till Bidé Elegant E400-W011

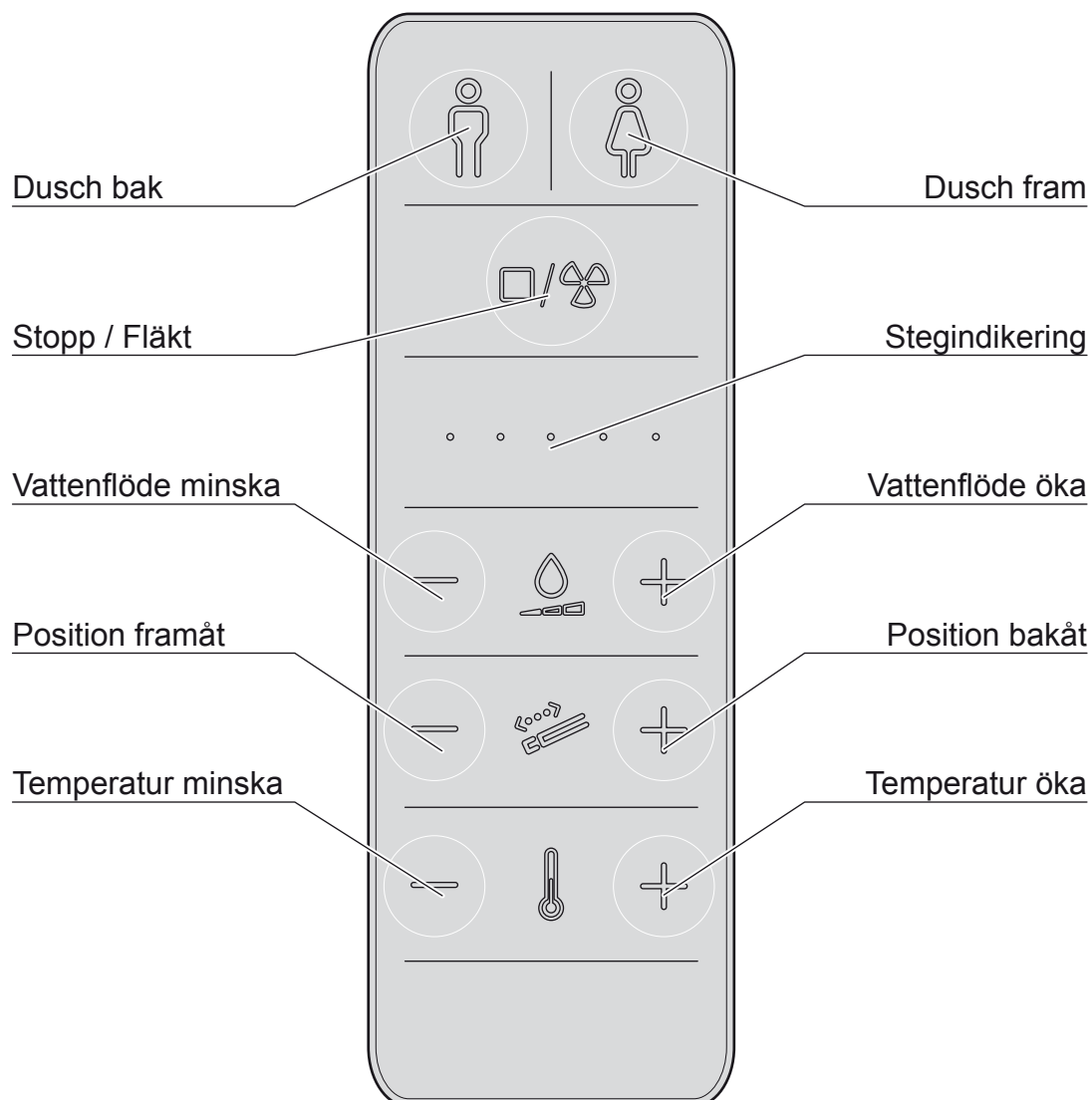

Kontrollknapp till Bidé Elegant E400-W011

Kontrollknappen (som sitter på bidéns högra sida) har både vrid- och knappfunktion, som i olika kombinationer styr **Bidé Elegant**.

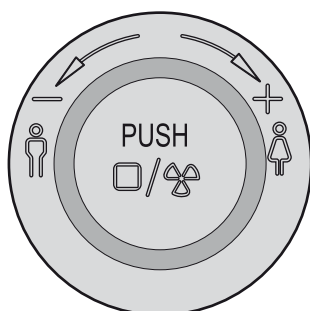


Dusch bak - dusch fram



- Sitt på toaletten.
 - Tryck på handkontrollens **Dusch bak** eller **Dusch fram** och bidén börjar duscha i vald riktning.
- Duschen slutar efter tre minuter.

Du kan alltid avbryta pågående funktion genom att trycka på handkontrollens **Stopp / Flätknapp**.

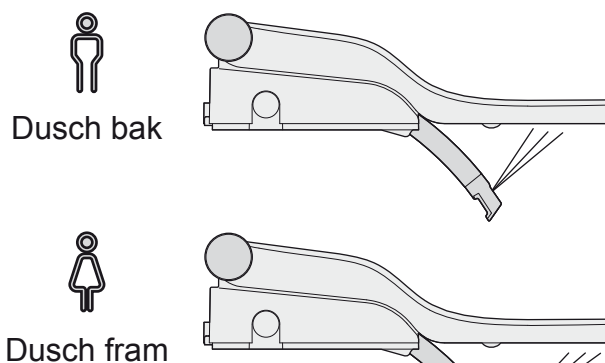


Eller:



- Sitt på toaletten.
 - Vrid **medsols** för **Dusch fram**.
 - Vrid **motsols** för **Dusch bak**.
- Duschen slutar efter tre minuter och börjar torka torrt.

Du kan alltid avbryta pågående funktion genom att trycka på bidéns **Kontrollknapp**.

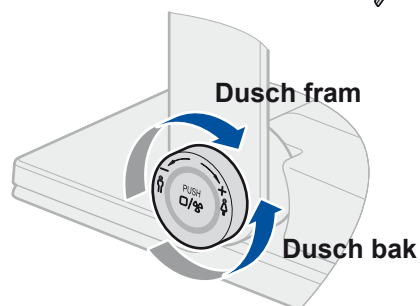

Not!


Under pågående **Dusch fram** eller **Dusch bak**: Bidén duschar först med fast position i 10 sekunder. Därefter med rörlig position i 18 sekunder. Sedan med fast position igen tills tre minuter är slut.

Torka torrt



- Sitt på toaletten.
 - Tryck på handkontrollens **Stopp / Flätknapp** och bidén börjar torka torrt. Fläkten slutar efter tre minuter.
- Om **Dusch fram** eller **Dusch bak** är i funktion:
- Tryck **två gånger** på handkontrollens **Stopp / Flätknapp** och fläkten startar (*ett tryck och duschen stannar, ytterligare ett tryck och fläkten startar*).

Du kan alltid avbryta pågående funktion genom att trycka på handkontrollens **Stopp / Flätknapp**.

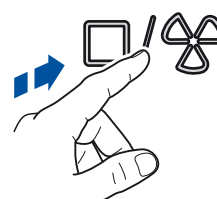


Eller:



- Sitt på toaletten.
 - Tryck på bidéns **Kontrollknapp** och bidén börjar torka torrt. Fläkten slutar efter tre minuter.
- Om **Dusch fram** eller **Dusch bak** är i funktion:
- Tryck **två gånger** på bidéns **Kontrollknapp** och fläkten startar (*ett tryck och duschen stannar, ytterligare ett tryck och fläkten startar*).

Du kan alltid avbryta pågående funktion genom att trycka på bidéns **Kontrollknapp**.

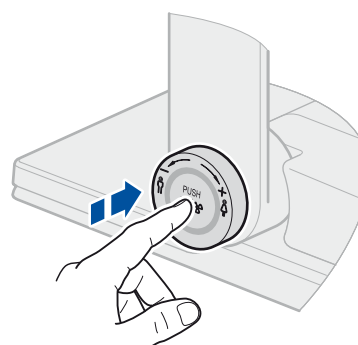


Stoppfunktion




Under pågående **Dusch fram**, **Dusch bak**, eller **Torkning**:

- Tryck på handkontrollens **Stopp / Fläktknapp** och bidén slutar duscha eller torka.

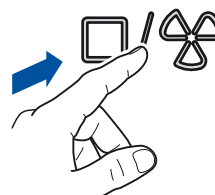

Eller:

- Tryck på bidéns **Kontrollknapp** och bidén slutar duscha eller torka.

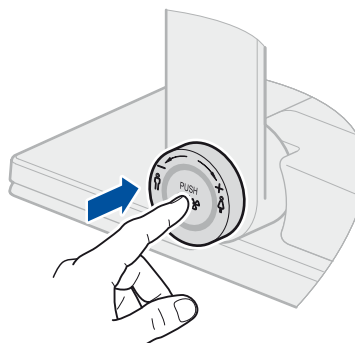


Justering av vattenflöde



Under pågående **Dusch fram** eller **Dusch bak**:

- Tryck på handkontrollens **Vattenflöde öka** eller **Vattenflöde minska** upprepade gånger för att uppnå önskat vattenflöde (justerbar i 5 steg).

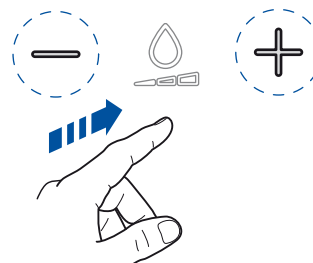


- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| Minimalt vattenflöde: | En indikering lyser |
| Förinställt vattenflöde: | Tre indikeringar lyser |
| Maximalt vattenflöde: | Fem indikeringar lyser |



Eller:


- Vrid **medsols** för att **öka vattenflödet**.
- Vrid **motsols** för att **minska vattenflödet**.

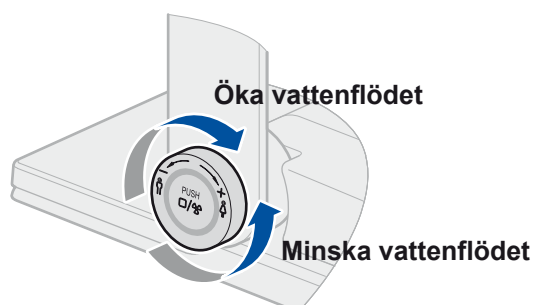

Justering av duschposition



Under pågående **Dusch fram** eller **Dusch bak**:
- Tryck på handkontrollens **Position framåt** eller **Position bakåt** upprepade gånger för att uppnå önskad position (justerbar i 5 steg).

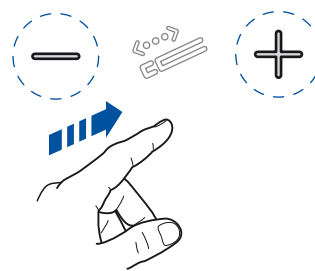


Längst fram: En indikering lyser
Mellanposition: Tre indikeringar lyser
Längst bak (förinställt): Fem indikeringar lyser



Justering av vattentemperatur




Under pågående **Dusch fram** eller **Dusch bak**:
- Tryck på handkontrollens **Temperatur öka** eller **Temperatur minska** upprepade gånger för att uppnå önskad vattentemperatur.

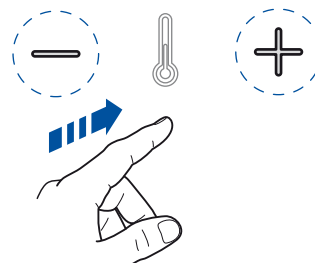

Eller:

- Tryck, håll in och vrid medsols för att öka vattentemperaturen.
- Tryck, håll och vrid motsols för att minska vattentemperaturen.

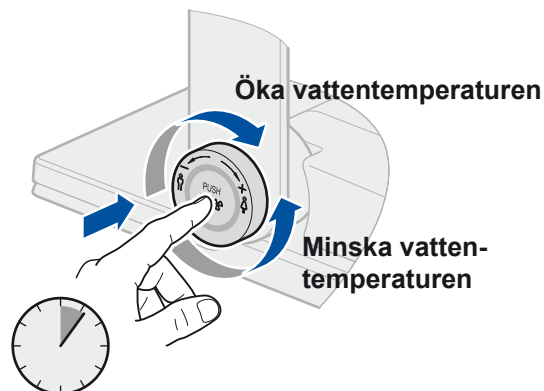


Justering av torkluftstemperatur




Under pågående **Torkning**:

- Tryck på handkontrollens **Temperatur öka** eller **Temperatur minska** upprepade gånger för att uppnå önskad torkluftstemperatur.

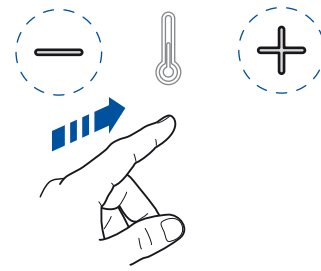

Eller:

- Vrid **medsols** för att **öka torkluftstemperaturen**.
- Vrid **motsols** för att **minska torkluftstemperaturen**.

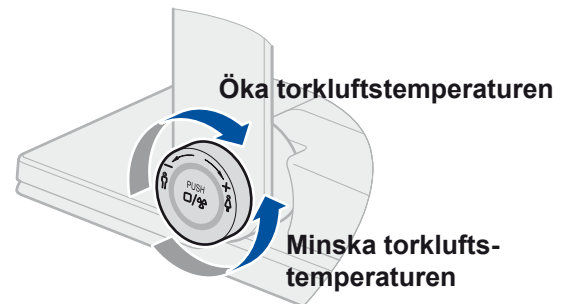


Massagealternativ




Under pågående **Dusch fram** eller **Dusch bak**:

- Tryck och håll in handkontrollens **Temperatur öka** eller **Temperatur minska**.

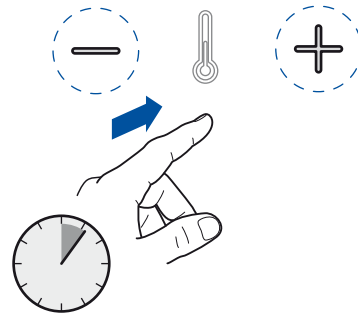

- Tryck samtidigt på handkontrollens **Vattenflöde öka** upprepade gånger för att uppnå önskat massageläge.

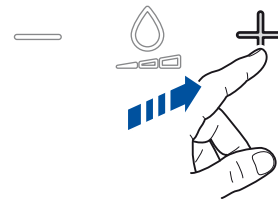

Oscillerande dusch: En indikering lyser



Pulserande dusch: Två indikeringar lyser




Oscillerande och pulserande dusch: Tre indikeringar lyser




Inställning av nattbelysning



- Tryck och håll in handkontrollens **Temperatur öka** eller **Temperatur minska**.

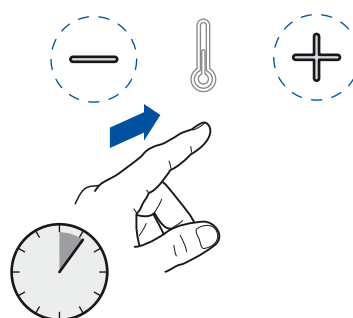

- Tryck **samtidigt** på handkontrollens **Position framåt** upprepade gånger för att uppnå önskad inställning av nattbelysning.

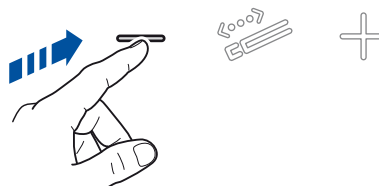

Av: En indikering lyser



På (förinställt läge): Två indikeringar lyser



Smartläge: Tre indikeringar lyser


(Med **Smartläge** menas att nattbelysningen är **på** i en mörk omgivning, och **av** i en ljus omgivning).



Eller:

Öppna **lock och sits**:

- Vrid **motsols** för att uppnå önskad inställning av nattbelysning.

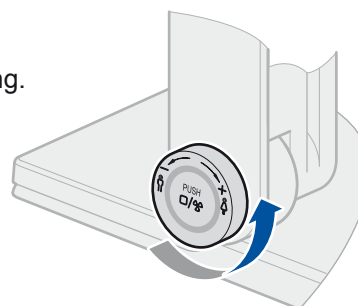


Inställning av doftneutralisering




Handkontroll


- Tryck och håll in handkontrollens **Temperatur öka** eller **Temperatur minska**.

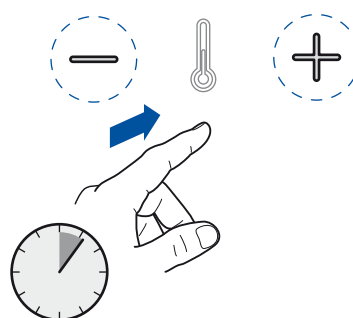

- Tryck **samtidigt** på handkontrollens **Position bakåt** upprepade gånger för att uppnå önskad inställning av doftneutralisering.

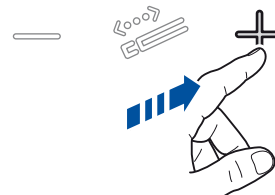

Av: En indikering lyser

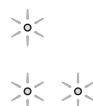


Smartläge (förinställt läge): Två indikeringar lyser (Med **Smartläge** menas att doftneutralisering är **på** när bidén används och stängs **av** en minut efter att användaren lämnat bidén. Används bidén, men ingen aktivering av Dusch eller Tork sker, stängs doftneutraliseringen av efter 15 minuter).

Eller:

Öppna lock och sitt på sitsen

(utan pågående Dusch eller Tork:

- Tryck och vrid samtidigt för att uppnå önskad inställning av doftneutralisering.

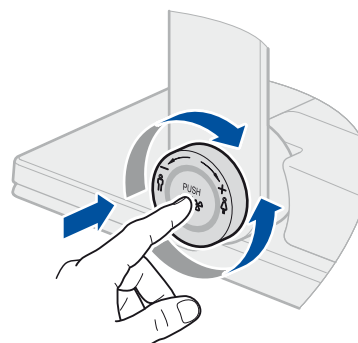


Kontrollknapp

Inställning av kontrollknappens belysning

K
o
n
t
r
o
l
l
k
n
a
p
p

Öppna lock och **sitt på sitsen, (utan pågående Dusch eller Tork):**

- Tryck och håll **minst 6 sekunder** och belysningen stängs **av**.
- Tryck och håll **minst 6 sekunder** och belysningen slås **på** (förinställt läge).

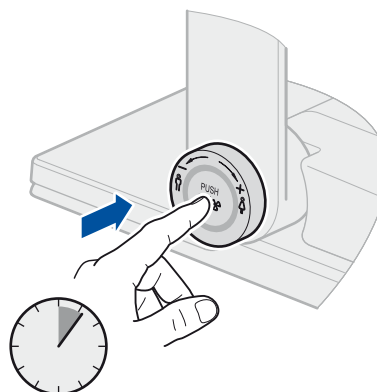


Inställning av Power Standby


K
o
n
t
r
o
l
l
k
n
a
p
p

Sits och lock nerfällt:





- Tryck och håll **minst 6 sekunder** för att **Stänga av** bidén.
- Power Standby** inträder.
- Tryck och håll **minst 6 sekunder** för att **Starta Upp**.

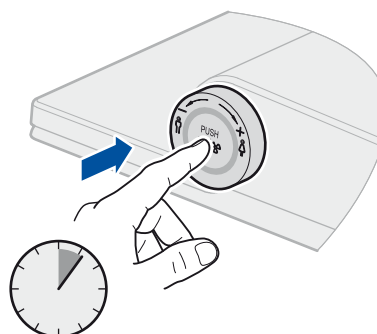

Insättning/byte av batterier till handkontroll

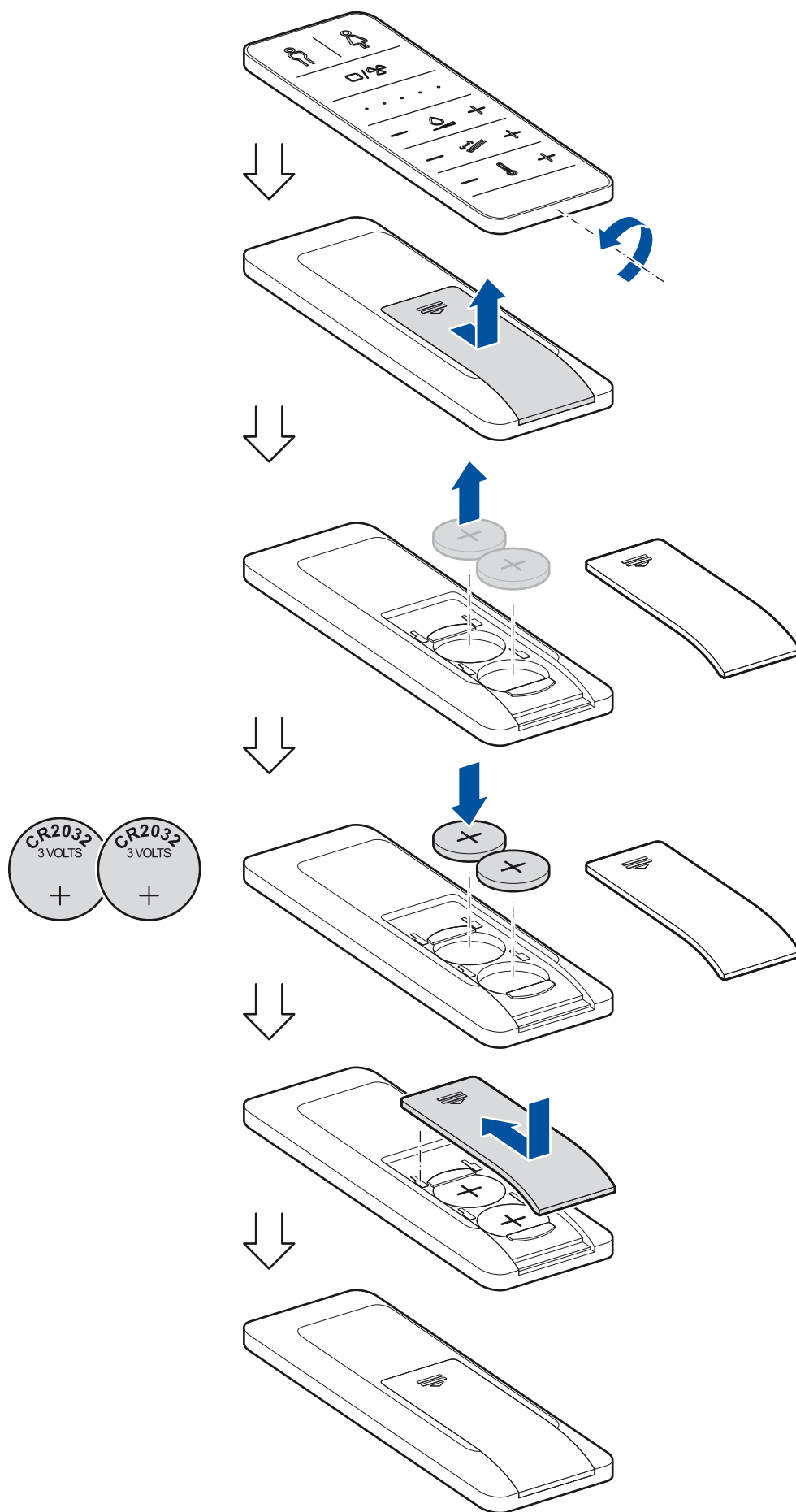

Måttskiss, Bidé Elegant E400-W011

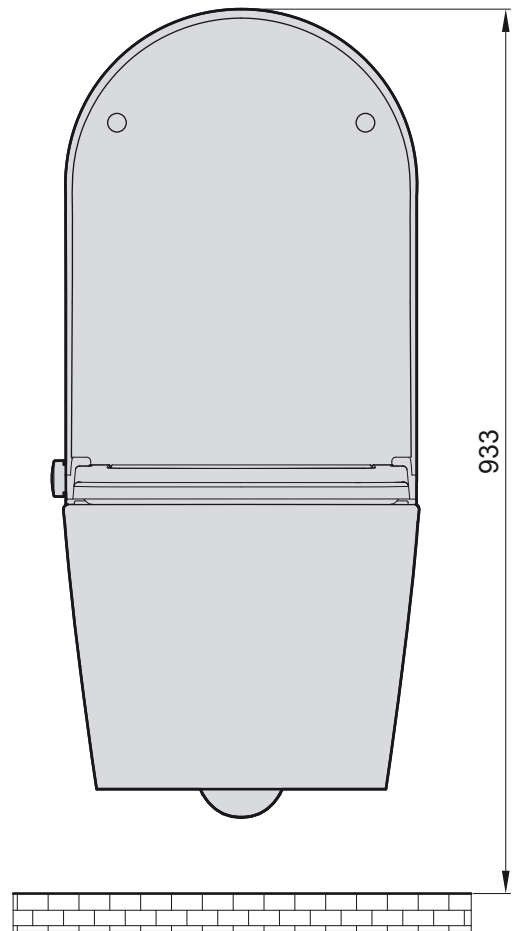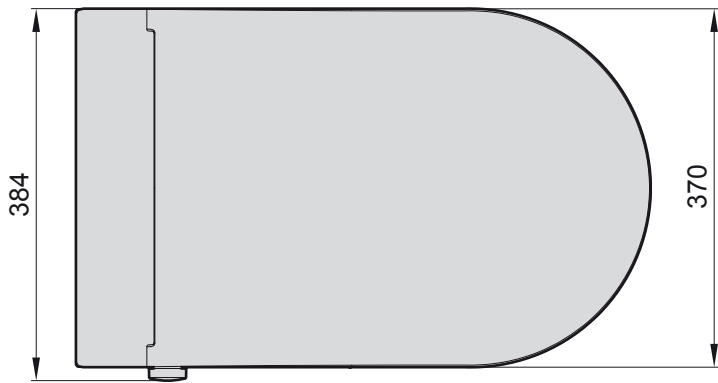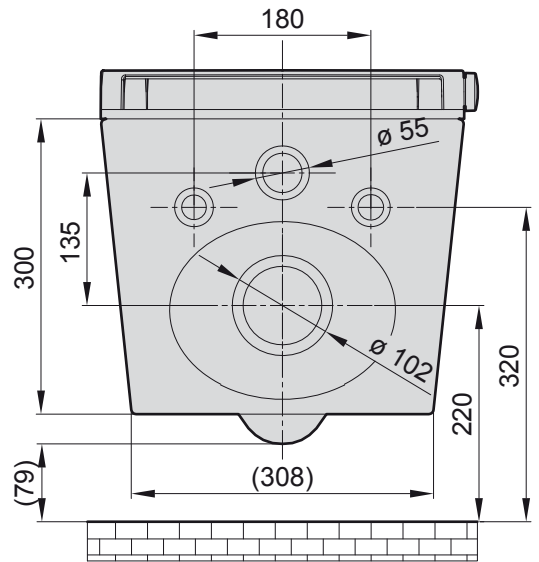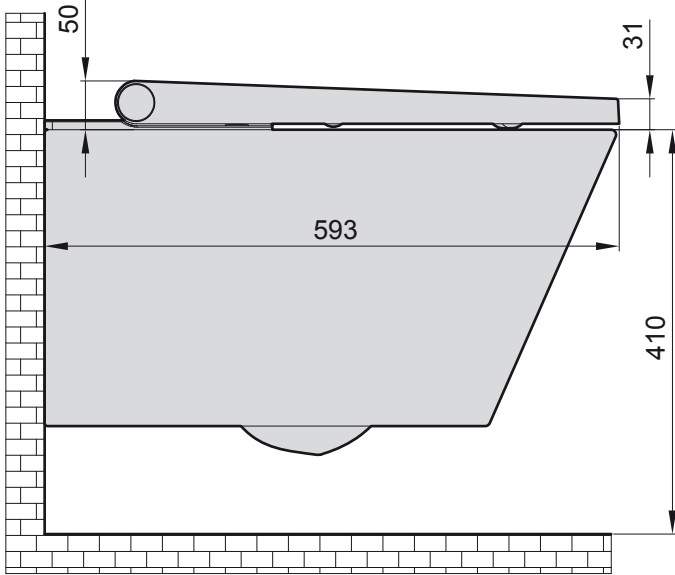

Teknisk specifikation, Bidé Elegant E400-W011

Område	Funktion & innehåll	Specifikation
Dusch	Dusch bak	
	Dusch fram	
	Oscillerande dusch	
	Pulserande dusch	
	Oscillerande och pulserande dusch	
	Vattentemperatur	Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
	Vattenflöde	Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
Varm luft	Duschposition	Justerbar i 5 steg (förinställd 5)
	Varmluftsfläkt	
Hygien	Lufttemperatur	Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
	Doftneutralisering	
	Duschmunstycke självrengöring	
Annat område	Duschmunstycke manuell rengöring	
	Nattbelysning	
	Belysning	
	Mjukstängande sits och lock	
	Kontrollknapp	
	Handkontroll	
	Skarvfri toalett	
	Vägghängd modell	
	Vattenanslutning	G 3/8"
	Märkspänning	230 V, 50 Hz
	Effekt	950 W
	Kabellängd	1,8 m
	Inkommande vattentryck	0,07 ~ 0,75 MPa (0,7 ~ 7,5 Bar)
	Inkommande vattentemperatur	4 ~ 35°C
	Omgivande temperatur	4 ~ 40°C
Täthetsklass vatten	IPX4	
Dusch info	Vattenflöde	350 ~ 650 mL/min
	Utgående vattentemperatur	31 ~ 39°C
	Dushtid	3 minuter
	Vattenvärmare	Tank
	Maximal effekt vattenvärmare	1200 W
	Säkerhetsanordning vatten	Termisk säkring/nivåbrytare
	Stopp för vattenretur	Luftspalt
Tork info	Maximal lufthastighet	5 m/s
	Maximal effekt värmefläkt	280 W
	Torktid	3 minuter
	Varmluftstemperatur	35 ~ 50°C
	Säkerhetsanordning luft	Termisk säkring/termostat
Doftneutralisering	Doftneutralisering metod	Diatom
	Doftneutralisering period	15 minuter
Handkontroll	Frekvensomfång	2460 MHz
	Maximal RF utgående effekt	-10 dBm
	Batterityp	3 V CR2032
	Antal batterier	2 st
Övrigt	Annan säkerhetsutrustning	Jordfelsbrytare
	Vikt (netto)	32 kg
	Storlek (mått)	593 x 370 x 380 mm