

Bruksanvisning:
Fotkontakt till Bidette R3. art.nr: 11 501



Fotkontakt

Fotkontakten är ett alternativ till handkontroll. Skall placeras på golvet. Kontakten ansluts till uttaget för handkontroll på fläkthuset.

Användning

Användaren trampar till en gång, då startar Bidette. Spolar fram kallt vatten(förspolning), duschar rent, torkar torrt. Allt stannar av sig självt. Man kan alltid avbryta i ett moment. Med ett extra tryck på kontakten stegar man fram till nästa moment. Om man startar om Bidette inom 15 min startar duschen direkt, utan förspolning.

OBS. Fotkontakt får endast användas om användaren förstår att sladden kan vara en risk. Fotkontakten är inte avsedd att stå på. Endast ett tryck behövs.

Storlek på knapp: Ø60 mm, höjd 25 mm. Storlek på golvplattan: Ø 90mm.
Längd på sladd: 2 meter.

Material: pvc

Rengöring: Ljummet vatten och mildt rengöringsmedel, tvättspit.

Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna anvisning. 2019-07-25

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika. tel: 0240 – 10102
info@svancare.se www.svancare.se

