

2020-04-08

## **Bruksanvisning Armstödslås till Lift art.nr: 10870**

denna bruksanvisnings art nr: 10859



Satsen består av:  
2st M8 x 40 rostfri  
2 st M8 Mutter rostfri  
2 st Plasthylsa

### Användningsområde:

Armstödslås används på produkten Lift då man vill låsa armstödet i nedfällt läge.

### Montering:

Montera fast skruven och muttern enligt bilden då armstödet befinner sig i nedfällt läge. Dra åt lagom hårt. För på den svarta plasthylsan.

Rengöring: Tvål och vatten, alkaliska rengöringsmedel, eller tvättsprit.

Återvinning: plast och metall.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.