

2020-04-02

Bruksanvisning Benförlängare till Balance art nr: 10087

denna bruksanvisnings art nr: 10193



Ingår i satsen (art nr 10087): 2 st. Hylsa med fäste, 2 st. Ställfot 55mm.

Användningsområde:

Benstativet till Balance har en ställbar fot som går att justera mellan 0 – 65 mm för att anpassa benstativet till toalettporslinets höjd och golvets lutning. Om toalettporslinet har en högre höjd än 450 mm skall benförlängare användas. Benförlängarna ska monteras på benstativet och kan monteras på 2 olika sätt beroende på toalettporslinets höjd.

- Benförlängare med medföljande ställfot (55 mm) 75 – 100 mm
ordinarie ställfot (85) används inte.
- Benförlängare med ordinarie ställfot (85 mm) 100 – 130 mm
medföljande ställfot (55) används inte.

Montering:

1. Skruva ur befintlig ställfot (85 mm)
2. Skruva i Hylsan.
3. Skruva nu i ställfot 55mm eller 85 mm.

Tänk på att det alltid är att föredra att ha så kort utskrivade ställfötter som möjligt, detta för att produkten då blir stabilare. Om toalettporslinet är av förhöjd modell så kanske det kan vara att föredra att byta till ett standardporslin.

Material och källsortering: Material: lackerat rostfritt stål med detaljer av polyuretan utan latex. Källsortering: Metallåtervinning och brännbart.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika.
tel. 0240 – 10102 info@svancare.se svancare.se