

2020-04-02

Bruksanvisning Hålförminskare Artnr:10050, 10047, 10046, 10049, 11277

denna bruksanvisnings art nr: 10090



Användningsområde

10050, 10047, 10046, 10049 är anpassade att användas tillsammans med Kan-sitsen (art nr 10041). Ex.för Balance eller Lift.

11277 är anpassad att användas på Bidette R3/M3 eller P12.

Hålförminskarna placeras ovanpå Kan alt. Bidette-sitsen. Hålförminskarna skall vara snabba att lägga på och ta av från toaletten, därför skall de ej sättas fast med remmar, tejp, kardborreband eller dylikt. Vissa hålförminskare är försedda med ett skyddande plastskikt, avlägsna detta innan produkten tas i bruk.

Var aktsam om produkten då den ej ligger på toaletten. Förvara produkten så den ej skadas, t.ex. på en krok på väggen eller placering på hylla. Om den lutas mot vägg finns risk att den glider ner och sedan trampas på.

Kontrollera produkten regelbundet så att den ej har blivit skadad. Skadad produkt får ej användas.

Teknisk information

Max brukarvikt: 40 kg.

Material: ABS plast med styrenskikt

Rengöring: Tvål och vatten, alkaliska rengöringsmedel, tvättsprit

Rekonditionering, lika som rengöring.

Miljö-, källsortering: förbränning eller återvinning.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.