

2020.02.04

Bruksanvisning Mjuksits art nr: 10399 Blå, och 10398 Vit.

denna bruksanvisnings art nr: 10845



Användning.

Mjuksitsen gör att sittytan på en toaletsits blir mjukare och varmare att sitta på. Mjuksitsen är framförallt anpassad att användas tillsammans med Kan-sitsen (art nr 10041 eller 10141) och Bidette. Kan-sitsen finns på våra produkter Balance och Lift. Det finns många andra toaletsitsar på marknaden som mjuksitsen passar på.

Applicering.

Mjuksitsen trycks fast, krängs på toaletsitsen. Vid borttagande krängs mjuksitsen försiktigt av så att inte mjuksitsen skadas. Var aktsam om produkten då den inte används på toaletten. Förvara produkten så att ej andra föremål ligger direkt på produkten och gör märken i den. Lämplig förvaringsplats är på en hylla eller större krok på väggen, mjuksitsen kan också sitta permanent på toaletsitsen. Använd aldrig klister eller tejp på mjuksitsen, detta kan skada produkten.

Materialet som används i mjuksitsen är mycket formbart, därför skall ej föremål ligga på sitsen då den inte används. Detta kan ge fula märken på sitsen. Oftast försvinner dessa märken med tiden.

Teknisk information:

Material: Ren cellpolyeten med slutna celler. Suger ej åt sig vatten.

Rengöring: Ljummet vatten och mildt rengöringsmedel, tvättsprit. Gäller även rekonditionering.

Återvinning: Lämnas bland plastmaterial alternativt till förbränning.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.