

Bruksanvisning:  
Fotkontakt till Bidette R3. art.nr: 11 501



### Fotkontakt

Fotkontakten är ett alternativ till handkontroll. Skall placeras på golvet. Kontakten ansluts till uttaget för handkontroll på fläkthuset.

### Användning

Användaren trampar till en gång, då startar Bidette. Spolar fram kallt vatten(förspolning), duschar rent, torkar torrt. Allt stannar av sig självt. Man kan alltid avbryta i ett moment. Med ett extra tryck på kontakten stegar man fram till nästa moment. Om man startar om Bidette inom 15 min startar duschen direkt, utan förspolning.

**OBS. Fotkontakt får endast användas om användaren förstår att sladden kan vara en risk. Fotkontakten är inte avsedd att stå på. Endast ett tryck behövs.**

Storlek på knapp: Ø60 mm, höjd 25 mm. Storlek på golvplattan: Ø 90mm.  
Längd på sladd: 2 meter.

**Material:** pvc

**Rengöring:** Ljummet vatten och mildt rengöringsmedel, tvättsprit.

**Källsortering:** elavfall

Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna anvisning. 2019-07-25

