


Monteringsanvisning Vägghängd Svan Lift art nr 10702.

Denna monteringsanvisning är ett komplement till "Bruksanvisning & Installationsmanual Lift" (art.nr 10780)

Montering av Vägghängd Svan Lift får endast utföras av person med erfarenhet av denna typen av arbete. Krav för att montera lyften i väggen är att vart fäste skall tåla en dragande kraft på minst 50 kg. Typ av vägg som går bra är betongvägg, trävägg eller liknande.

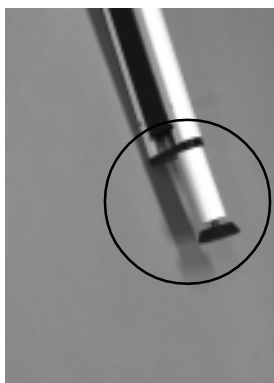

1. Montera de båda fötterna på benen samt de båda armstöden på sittplåten.



2. Placera lyften över toalettstolen. Anslut handkontrollen under huven. Slå på strömbrytaren under huven



3. Häkta på sittplåten i sitt översta läge och sänk sedan sitsen så att plåten vilar på toalettstolen



4. Centrera lyften så att de båda hålen i bakkant av sittplåten hamnar rakt över toalettens båda hål.

5. Justera in de övre väggfästena på 950mm från golvet, markera borra, plugga och skruva.



6. Montera de båda undre Fästena 200 från golv. Se till att alla monteringskruvar är åtdragna.

7. Montera fast den medföljande sitsen på sittplåten