

Svan Care 2020-04-17  
(Denna bruksanvisning art nr: 10552)

## Monteringsanvisning och Bruksanvisning till Monteringsplåt 11300

### Användning

Monteringsplåten används då man ska montera termostatblandare och fläkthus till Bidette, och man inte vill skada väggen med borrhål.

### Vägg

Monteringsplåten är försedd med en dubbelhäftande tejp på baksidan. Väggens ytskikt måste tåla den belastning monteringsplåten med blandaren och fläkten ger upphov till (c:a 6 kg). Kontrollera att väggen tål detta innan montering sker. Ytan måste vara helt slät och ren. Kakel med struktur eller liknade yta ska undvikas, dessa gör att kontaktytan mot tejpens blir mindre och monteringsplåten sitter inte fast lika hårt.

### **En kaklad vägg med struktur eller liknande ojämnheter bör undvikas.**

**Finns det risk att plåten kan lossa ska skruv användas. Dock endast efter godkännande av fastighetsägaren!**

**Väggen där plåten ska monteras måste vara helt plan och slät samt fri från smuts.**

**Låt plåten sitta 1 timma innan den belastas!! Detta för att klistret ska hinna härda.**

### Montering

- Välj ut en lämplig **slät** plats där monteringsplåten ska sättas upp.
- **Rengör ytan noga med isopropanol. Ej T-sprit!** Då det kan göra ytan fet.
- **Rengör dessutom noga med medföljande servett.**
- Ta bort skyddsplasten på plåten och tryck fast den mot väggen.
- **Låt plåten sitta 1 timma innan den belastas. Viktigt!**
- Finns det risk att plåten kan lossa ska plåten skruvas fast med en skruv, där hålet tätas med silikon. Skruvat montage kräver godkännande av fastighetsägaren..
- Häng upp fläkthus och termostatblandare på plåten.

### Demontering

- Vid borttagning av en uppklistrad plåt används en pianotråd eller liknande att skära sönder skumskiktet mellan plåt och vägg. Håll pianotråden med två tänger och såga nedåt. Ta bort limresterna med en glashällsskrapa för att slutligen göra rent ytan med T-sprit eller liknande.

### Underhåll

- Monteringsplåten behöver inget speciellt underhåll, den är tillverkad helt i rostfritt stål. Rengör på samma sätt som komponenterna som sitter på plåten. Torkas med fuktad duk. Desinfektera med sprit vid behov.