

2020-04-07

Bruksanvisning och montering Rikstöd (art nr: 10515) passande på Balance

denna bruksanvisning art nr: 11554



Montering och användning

Rikstöd är ett tillbehör till produkten Balance. Används som fotstöd för att lätt komma åt att sätta en kateter.

Montera först det svarta fästet med hållaren på höger eller vänster ben på Balance. Se till att fotpallen inte slår i fästet vid upp och nedfällning av fotpallen.

Placera rikstödet i hållaren och justera in så att foten hamnar i ett bra läge. Dra åt samtliga skruvar hårt.

Fotstödet kan tas bort från hållaren då det inte används.

Rengöring/Rekonditionering

Rengöres med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Desinfektionsmedel.

Material och källsortering: Material:

Lackerad rostfritt stål. Aluminium. Fotyta av cellpolyeten med måtten 90 x 160 mm med stödkant för hälen.

Källsortering: Metallåtervinning.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.