



Läs **Montering och Bruksanvisning** före installation och användning av **Grip armstöd**. Spara manualen för framtida bruk.

## Grip armstöd för Bidette

Art. nr. 10 415



Grip armstöd (monterat på Bidette)

### Produktbeskrivning

**Grip armstöd** är avsedd att användas tillsammans med Bidette. Armstöden är individuellt uppfällbara.

Fästplatta för handkontakt ingår. Det finns också toalettrullehållare som tillhör, att montera under greppdelen. Art. nr. 11495.



### Viktigt!

**Grip armstöd** får endast monteras på toaletter som är väl förankrade i golv eller vägg.

Skulle det uppstå problem med **Grip armstöd** kontakta då Arbetsterapeuten eller Svancare för support.

Använd endast originaltillbehör från Svancare. Svancare påtar sig inget ansvar, om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än angivet i denna bruksanvisning.

Max belastning: **65 kg/armstöd, 130 kg tillsammans.**

**SVAN CARE AB**  
Alvägen 1  
771 41 LUDVIKA, Sweden



Tel: 0240-101 02, fax: 0240-100 22  
info@svancare.se  
www.svancare.se

## Rengöring

Vid behov rengör produkten med tvål och vatten. Använd 70% tvättsprit vid behov.

## Rekonditionering

Plocka isär hela produkten. Delarna tvättas rent med tvättmedel (alternativt med vagndiskdesinfektor eller liknande), sköljs med vatten och torkas. Desinfektera. Kontrollera samtliga delar efter slitage, byt ut vid behov.

## Material, miljö och källsortering

**Grip armstöd** är tillverkad i lackerat rostfritt stål med greppdel av latexfritt gummi. Greppdelen skickas till förbränning eller återvinning. Metalldelar skrotas.

