

2020-04-07

Bruksanvisning Sitt- RIK skiva art.nr : 10542

denna bruksanvisningens art nr: 10196



Användningsområde:

Sittskivan / Rik-skivan placeras ovanpå toalettsitsen närmast vattentanken med antiglidskydden vända nedåt mot sittringen, dessa förhindrar skivan att glida. Då skivan ligger på plats blir det en bra sittyta för bålstabilitet. Underlättar vid RIK.

Att skivan är tunn underlättar för att lätt ta bort den medan man ”sitter kvar”.
Lätta bara lite på stjärten så kan man dra skivan åt sidan.

RIK skivan har en storlek som gör den enkel att ta med sig på resa.

Rengöring/rekonditionering:

Skivan rengörs med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Tvättsprit.

Material och källsortering: Akrylplast källsortering: plast

Mått: bredd: 340mm, djup: 170mm, tjocklek: 5 mm.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.